


ドアセンサ発信器

設置方法 - 単一音源

送信機内蔵マイクの使用


- 1 電池タブを引き抜き、送信機を始動させます。
ウェットティッシュで壁を拭き、マジックテープの保護フィルムを剥がします。
- 2 ドアセンサ発信器をドアベルの音源の左側、できるだけ近くに取り付けます。
付属のネジとアンカープラグを使用することもできます。

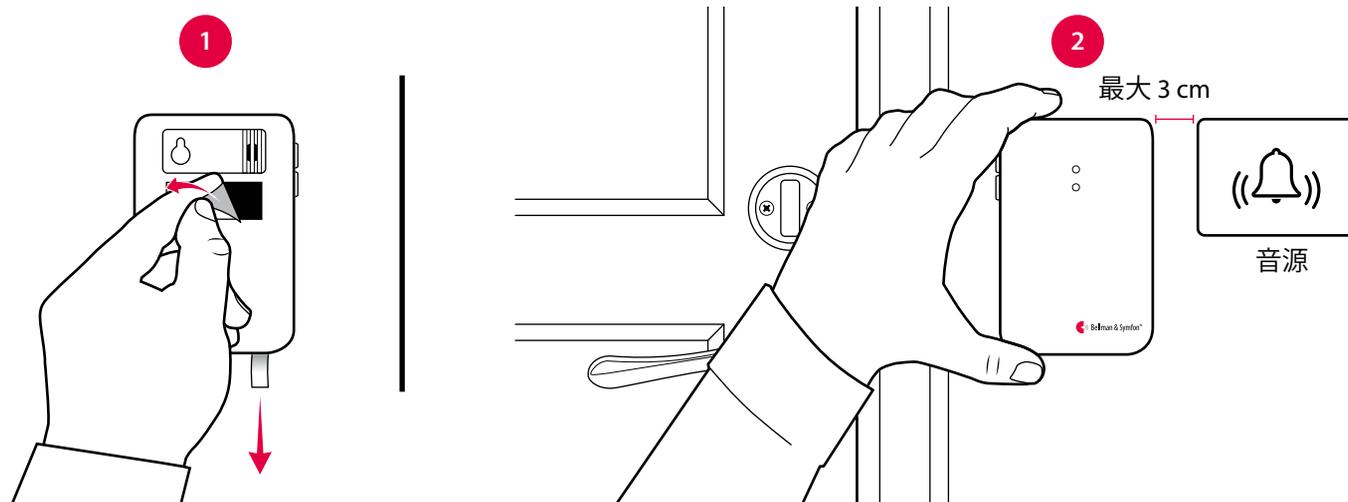

代替設置方法 - 単一音源

外部マイクの使用

- 1 外部マイクを送信機に接続します。
保護フィルムをはがし、インターホンのスピーカーに貼り付けます。
- 2 電池タブを引き抜き、送信機を起動させます。マジックテープの保護フィルムをはがし、送信機を壁に取り付けます。
- 3 2分以内に下側のボタンを10回押して、内蔵マイクの電源を切ります。LEDが赤色で3回点滅します。
注：2分を超えた場合は、電池を抜いて再度電池を入れ、送信機を再起動する必要があります。

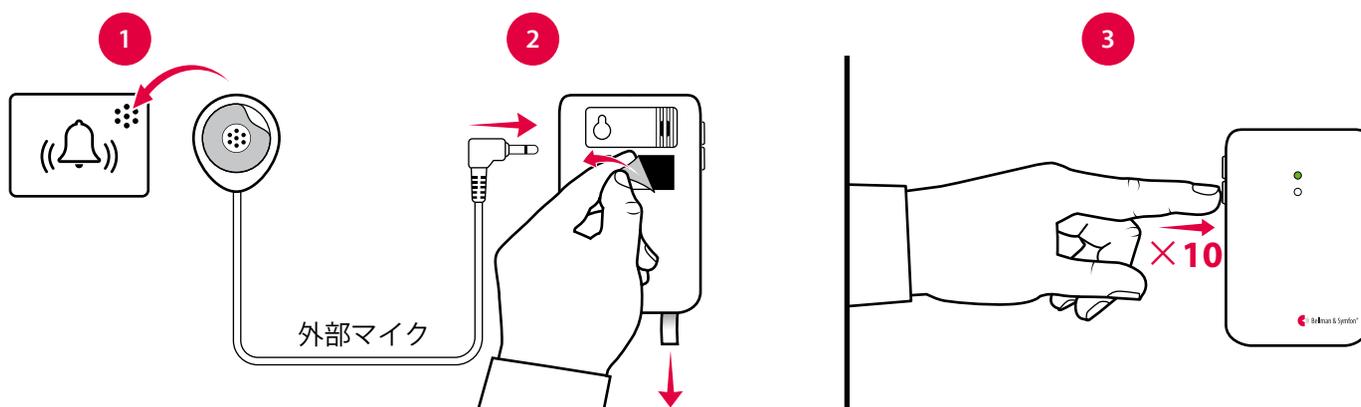

内蔵マイクを再びオンにする

電池を取り外してトランスミッターを再起動し、電池を戻します。2分以内に下側のボタンを10回押して、内蔵マイクの電源を入れ直します。LEDが緑色に3回点滅して確認できます。


ドアセンサ発信器

ドアベル音検知の設定

発信器にドアベルの音を認識させます。

- 1 上部のLEDが点滅し始めるまで、ボタン1を押し続けます。離すと録音が開始されます。
- 2 ドアブザー（連続音）の場合：ドアブザーを8秒以上長押しします。
ドアチャイムの場合：ドアベルを8回以上押す。
- 3 送信機のボタン1を押して録音を停止します。LEDが赤く点灯した場合は、手順1と2を繰り返す必要があります。

注：すべての録音音を削除するには、ボタン1と2を同時に5秒間押し続けます。

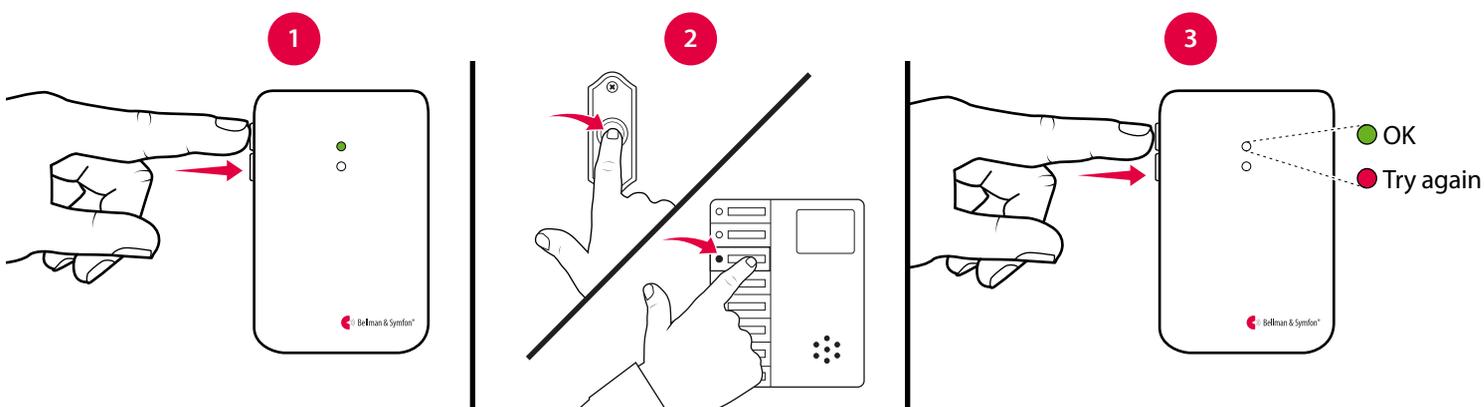

接続テスト

テストボタンの使用

- 1 ドアセンサ発信器の両方のテスト・ボタンを同時に押します。上部のLEDが緑色に点灯し、無線信号が送信されていることを示します。
- 2 受信機が点灯・鳴動し、信号を受信したことを示します。

ドアベルの使用

- 1 ドアホンまたはインターホンのボタンを押します。送信機のLEDが緑色に点灯し、音を感知したことを示します。
- 2 受信機が点灯・鳴動し、信号を受信したことを示します。

