


モバイルフォンセンサ

ボタンと接続

人間工学に基づくグリップ

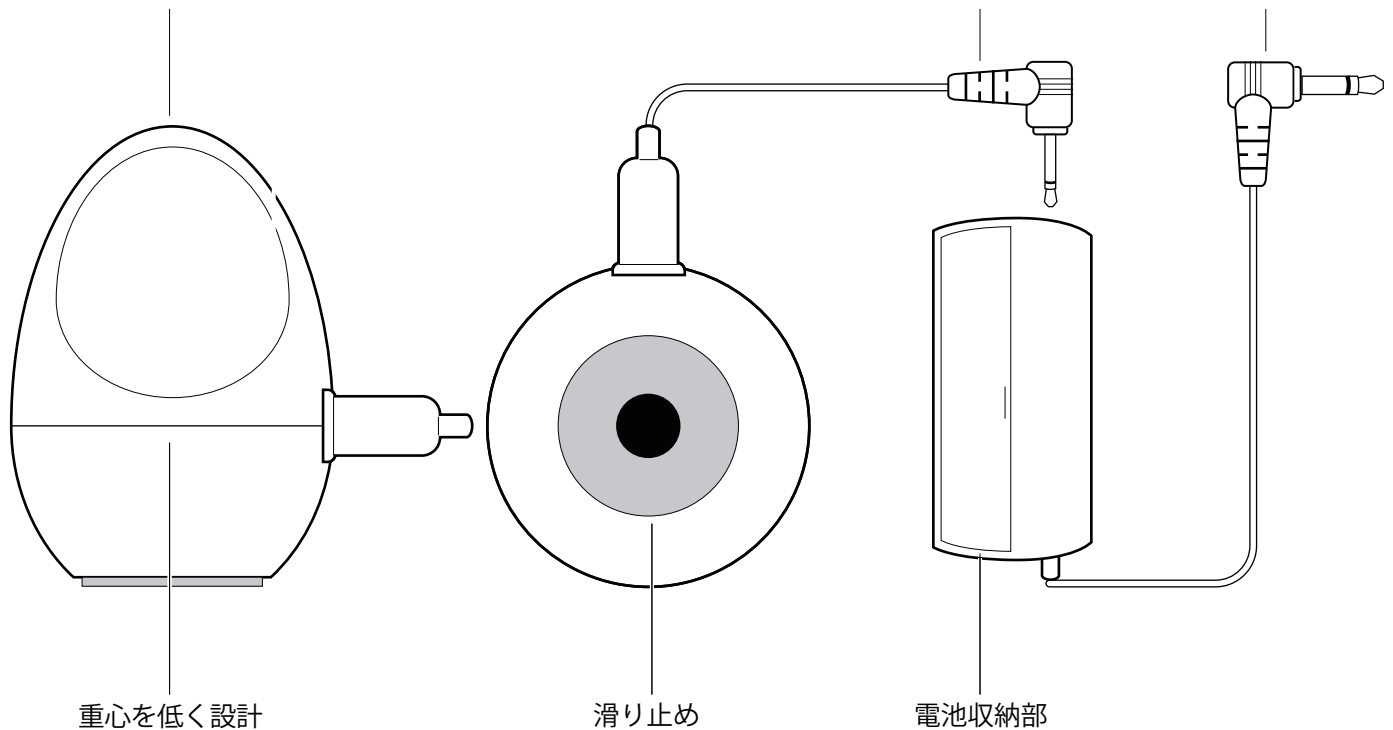

【技術仕様】

本モデルはアダプターを備えており、2.5 mm または 3.5 mm インターフェースを持つすべての Bellman & Symfon 製品に接続できます。

【対応機器】

BE1431 マルチセンサ発信器
BE1441 フラッシュ受信機
BE1491 ベビーセンサ発信器
BE1580 アラームクロック受信器
BE1370 アラームクロックプロ


【追加技術仕様】

- 電池電源: AAA 1.5 V アルカリ電池 ×1
- 光学検出: ディスプレイが点灯すると作動
- 光感度: 可視光 3 lux 以上が 2 秒以上継続
- コネクタ:
 - モバイルフォンセンサー用:
 - 2.5 mm モノラルジャックプラグ
 - アダプター用:
 - 3.5 mm モノラルジャックプラグ
- ケーブル長: 120 cm (4 フィート)
- センサー寸法・重量: 24 × 34 × 24 mm、20 g
- アダプター寸法・重量: 53 × 25 × 18 mm、27 g

モバイルフォンセンサ


【アラームクロックでの BE9250 の使用方法】

- (1)電池収納部を開け、付属の電池を装着し、モバイルフォンセンサーを 2.5 mm 入力に接続します。
- (2)アダプターをアラームクロック背面の 3.5 mm 外部トリガー入力に接続します。
- (3)センサーを携帯電話やタブレットのディスプレイ上に置き固定電話などから携帯電話に通話します。ディスプレイが点灯するとアラームクロックの黄色い Visit LED が点滅し、音・点滅・振動が開始されます。

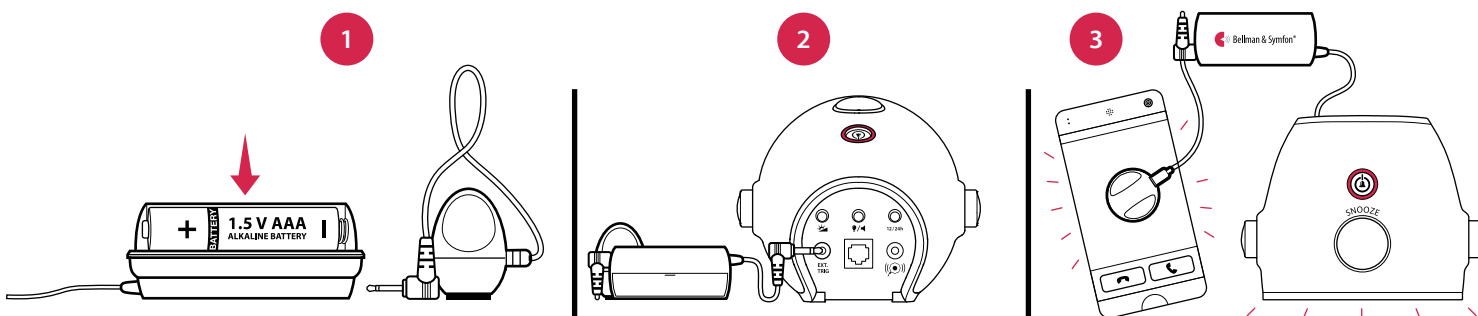

【フラッシュ受信器での BE9250 の使用方法】

- (1)モバイルフォンセンサーを受信機背面の 2.5 mm 外部トリガー入力に接続します。
- (2)センサーを携帯電話やタブレットのディスプレイ上に置きます。
- (3)固定電話などから携帯電話に通話します。携帯電話のディスプレイが点灯すると、受信機の黄色い Visit LED が点灯し、フラッシュが開始されます。

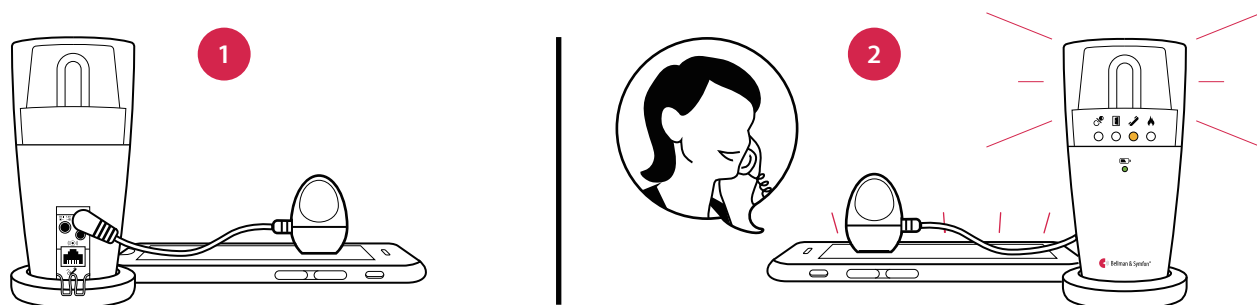

【マルチセンサ発信器での BE9250 の使用方法】

- (1)マルチセンサ発信器の前面カバーを開け、モバイルフォンセンサーを 2.5 mm 外部トリガー入力に接続します。センサーを携帯電話やタブレットのディスプレイ上に置いてください。
- (2)固定電話などから携帯電話に通話します。携帯電話のディスプレイが点灯すると、送信機上面の LED が緑色に点灯し、無線信号が送信されていることを示します。
- (3)受信機の黄色い Visit LED が点灯して信号の受信を示します。さらに、受信機の種類に応じて音・点滅・振動が開始されます。

